



COMMANDE OCULAIRE

COMMANDE SPÉCIALE

GazeDriver V002

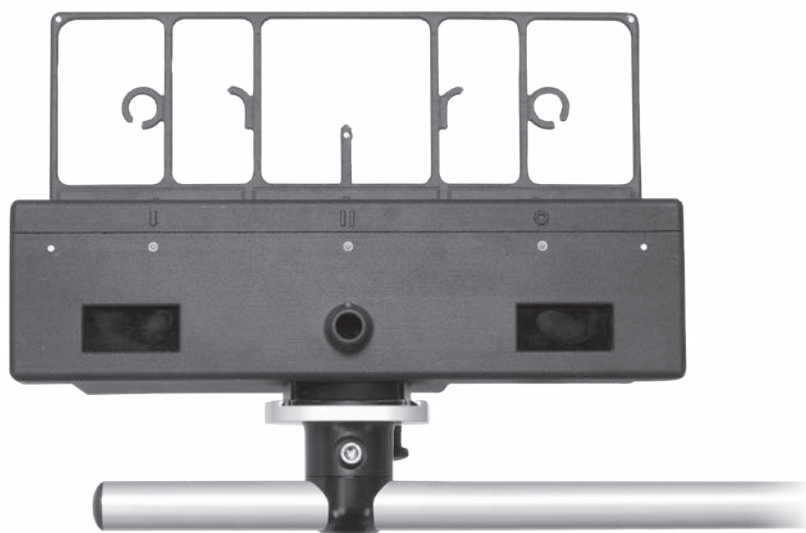

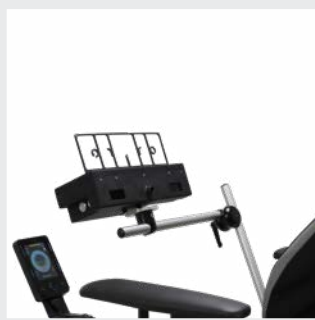

GazeDriver monté sur le fauteuil roulant



Contenu : GazeDriver, gabarit d'entraînement, Switch Box, support

La mobilité pour tous avec la commande oculaire

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

GazeDriver est un dispositif de commande oculaire pour fauteuils roulants. Il est destiné à être utilisé avec des fauteuils roulants électriques standard afin de contrôler les mouvements du fauteuil et de communiquer via une tablette, un téléphone ou un PC.

GazeDriver est destiné à être utilisé dans un environnement de soins à domicile par des personnes handicapées physiques capables de contrôler les mouvements de leurs yeux.

DOMAINE D'UTILISATION

- Le module GazeDriver peut être utilisé dans les mêmes endroits qu'un fauteuil roulant électrique classique.
- Le module GazeDriver peut être utilisé dans le cadre de soins à domicile et dans un environnement de soins.
- Le module GazeDriver peut être utilisé comme suit :
 - À l'intérieur sans accompagnateur
 - À l'extérieur avec un accompagnateur.
 - À l'extérieur sans accompagnateur si l'utilisateur peut actionner l'arrêt d'urgence.

FORMULAIRE DE COMMANDE 1 de 4 **COMMANDE OCULAIRE GazeDriver**

☐ COMMANDE

☐ DEVIS

☐ VERSION SPÉCIALE


Formulaire de commande rempli info@meyragroup.com
à envoyer par e-mail à :

Service après-vente : +49 571 93292 311

Adresse de facturation / n° client :

Adresse de livraison :

Notes / Remarques :

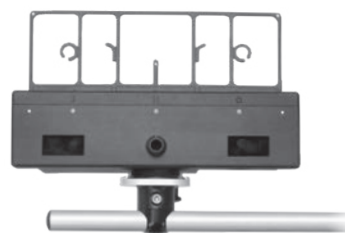

COMMANDE OCULAIRE GazeDriver

25 000,00 €

Tous les prix sont indiqués hors TVA ! Valable du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB.

Vous trouverez des informations sur les produits sur le site : www.meyra.de.

Pour plus d'informations sur la procédure de mesure, veuillez consulter www.meyra.de/messverfahren.

Quantité
commandée :



Équipement de base

1. GazeDriver avec gabarit d'entraînement
2. Système de montage « Assise »
3. Accompagnement à la livraison par un spécialiste produit

DONNÉES DE L'UTILISATEUR


Prénom*:	
Nom*:	
Rue:	
CP :	
Lieu* :	
Pays :	
Date de naissance* :	
Diagnostic -1- :	
Diagnostic -2- :	
Téléphone:	
Mobile :	
E-mail :	
Numéro de commande :	
Caisse d'assurance maladie / Organismes payeurs :	
Commerce spécialisé ASP	
Numéro de téléphone :	
Spécialiste en approvisionnement MEYRA :	
Informations relatives à l'homologation à partir de la semaine :	

*Champs de saisie obligatoires !

DIMENSIONS ANATOMIQUES (EN MM):

Pour la détermination, voir les croquis dans les informations ci-jointe!

1) Profondeur d'assise*:	
2) Largeur d'assise* :	
3) Largeur de poitrine :	
4) Profondeur de poitrine:	
5) Hauteur du coude :	
6) Hauteur des aisselles :	
7) Hauteur du dos :	
8) Hauteur de tête :	
9) Longueur de l'avant-bras :	
10) LJ* :	
Taille du corps* :	
Poids (kg)* :	

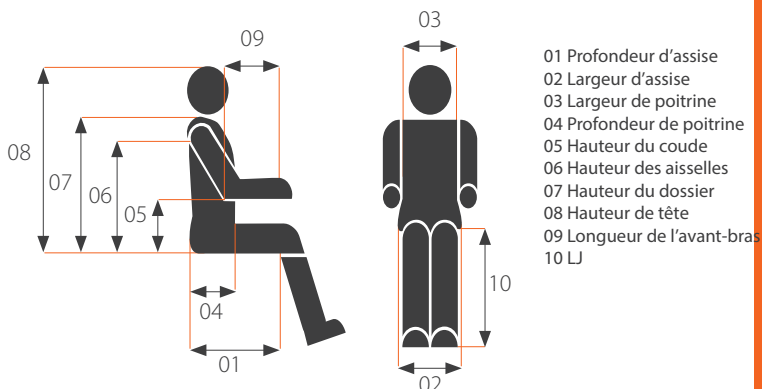

Les dimensions d'assise sont toujours mesurées sans coussin d'assise !

Je confirme que toutes les informations saisies sont correctes et exactes.

J'accepte la transmission des informations/données que j'ai faites et des photos/vidéos que j'ai prises à MEYRA GmbH (Meyra-Ring 2, D-32689 Kalletal) et au commerce spécialisé aux fins de l'exécution du contrat/de la fabrication du produit.

.....
Date/Signature

Ceci certifie que toutes les informations saisies sont correctes et exactes.

.....
Date/signature du revendeur spécialisé

☐

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☐

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Caractéristiques techniques

Module GazeDriver	
Longueur	300
Largeur	130
Hauteur	80
Poids	1 180
Module Splitter	
Longueur	152
Largeur	46
Hauteur	30
Poids, y compris tous les câbles	405
Type de protection du boîtier	IP24
Plage de température ambiante	+5 °C à +40 °C
Température de stockage	-25 °C à +70 °C
Zone de détection de l'eye tracker	50 à 60 cm (à partir de l'œil de l'utilisateur)
Bande de fréquence	2,4 GHz / 5 GHz
	Puissance de sortie max. : +18,5 dBm

Dimensions en mm, poids en kg, roues en pouces, tolérances dimensionnelles ± 10 mm

Fabricants/modèles compatibles avec les commandes pour fauteuils roulants	OMNI SPECIALITY CONTROL INTERFACE OMNI2 SPECIALITY CONTROL INTERFACE Dynamic Controls DLX-IN500-A et soit DLX-REM400-B, soit DLX-REM500-A
Interface et raccord réseau	D-Sub 15 (module GazeDriver) D-Sub 9 (interface pour fauteuil roulant) Cosse de câble M5 (raccordement de la batterie)
Entrée	18 V - 34 Vcc 30 W
Bloc d'alimentation intermédiaire (si utilisé)	320 x 60 (12,5")
Données relatives aux fusibles	Utilisation 1,6 A, 250 V, à action retardée, 6x32 mm (la série Littelfuse 326 est recommandée)
Chargeur pour fauteuil roulant	Doit fournir au moins 1 MOP (dispositif de protection) à partir du câble d'alimentation
Sécurité électrique	Classe 2/alimentation interne*

*Conformément à la classification de sécurité électrique, le module GazeDriver est considéré comme un dispositif médical de classe II lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation externe permettant une connexion au réseau électrique, comme c'est généralement le cas avec un chargeur de batterie pour fauteuils roulants. Sinon, il est considéré comme alimenté en interne.

00

Commande spéciale

ARTICLE	DÉSIGNATION	EURO €
☐ 1096412	Kit GazeDriver R-Net Composant R-Net : bouton d'arrêt d'urgence ATTENTION : module Omni2 et Gyro requis	25 000,00
☐ 1096411	Kit GazeDriver LINX Composant Linx : bouton d'arrêt d'urgence ATTENTION : module LINX IN 500 et REM 500 requis	25 000,00

01

Systèmes de montage avec support GazeDriver

ARTICLE	DÉSIGNATION	EURO €
☐ 1096410	Système de montage de l'assise	0,00 €
☐ 1096413	Système de montage de la tablette thérapeutique	1 990,00 €
☐ 1096788	Système de montage du dossier	2 490,00 €
	MY-Individual (fournir les données exactes)	
		sur demande

☐

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

☐

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

02

Options (uniquement lors d'une mise à niveau)

CODE	DÉSIGNATION	EURO €
☐ 4789/2060	Commande de l'accompagnateur montée à gauche	718.00
☐ 4789/2074	Commande de l'accompagnateur montée à droite	718.00
☐ R-Net	☐ LINX	
☐ 918	Module gyroscopique - Stabilisation de la conduite (codage obligatoire)	1 678.00
☐ R-Net	☐ LINX	
☐ 839	R-Net Omni 2 - Module d'interface avec écran	2 834.00
☐ 2855	Module d'interface LINX In 500	800.00
☐ 2850	Ecran LINX REM 500	1 599.00
☐ 778	Bouton d'arrêt d'urgence Piko 30 mm	290.00

02

Contrôle environnement

HIDREX ARTICLE	DÉSIGNATION	EURO €
☐ UMHM20001	HouseMate Pro 6S - IR et Easywave	1 750.00

Remarques

Date:

Lieu

Tampon/Signature :